


Trageanleitung FFP2 Maske



1. Die Maske wird mit dem Nasenclip noch oben und außen getragen. Bitte umfassen Sie die Ohrbügel jeweils mit der rechten und linken Hand.



2. Setzen Sie die Maske am Kinn an und ziehen Sie sie von unten nach oben über Mund und Nase. Führen Sie die Ohrbügel hinter die Ohren (linker Bügel hinter linkes Ohr, rechter Bügel hinter rechtes Ohr).

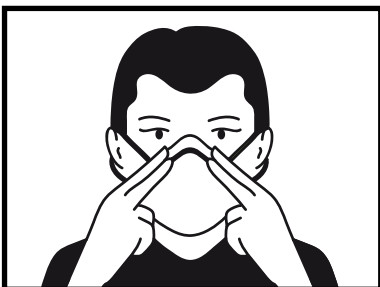

3. Lassen Sie die Ohrbügel los und drücken Sie nun den Nasenbügel in Form. Beginnen Sie auf dem Nasenrücken und streichen Sie nun nach links und rechts den Bügel glatt und passen Sie so die Maske Ihrer Gesichtskontur an. Dies sorgt einerseits für Tragekomfort und verhindert Druckstellen und ist andererseits für die Dichtigkeit und damit die Schutzfunktion der Maske sehr wichtig.



4. Nachdem Sie die Maske Ihrer Gesichtskontur angepasst haben, prüfen Sie den Sitz und die Dichtigkeit der Maske, indem Sie beide Hände auf die Maske legen und tief ein- und ausatmen. Es darf keine Luft an den Rändern der Maske austreten.